

Information „Home-Modul“ Softwareinstallation


Sofern Sie das Programm auf CD oder Stick bekommen haben beginnen Sie bitte mit 2)

1) Download „i-health-home-Modul“

bitte rufen Sie unter folgendem Link das Installationsprogramm ab:


<http://i-health.com/media/12367/230588.exe>

oder manuell: „http://i-health.com“ dann links: „PATIENTEN“ dann „ihhome.exe“

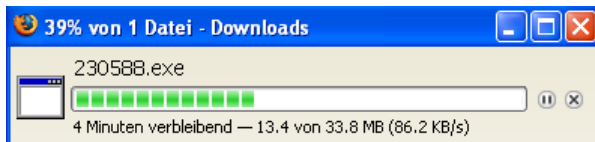

Die Datei wird gespeichert

2) Installation „i-health-home-Modul“

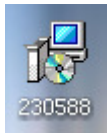

Bitte führen Sie das Installationsprogramm aus




Bestätigen Sie alle Abfragen „positiv“

Nach der Installation
Erscheint dieses Symbol auf dem Desktop
Bitte führen Sie es aus.



Bitte verbinden Sie das Therapiegerät mit Ihrem Rechner

Installation wird ausgeführt
Bestätigen Sie alle Abfragen „positiv“

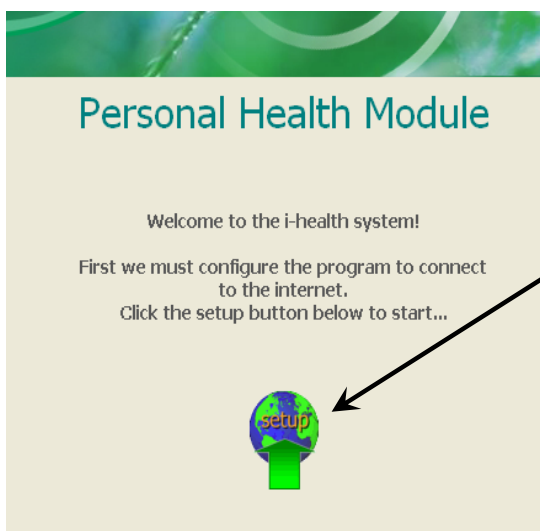

Dies ist das Hauptprogramm

Bitte „Setup“ anklicken


Für Fragen steht Ihnen die Hotline zur Verfügung (0931) 32283-12 // (0177) 33 99 990




* Blatt „Anwendung“

Bitte geben Sie Ihren
Namen
Benutzername*
Kennwort*
 ein und
klicken Sie hier
 um das Kennwort zu speichern
Bitte bestätigen



Bitte stellen Sie sicher, dass der Rechner „online“ ist.

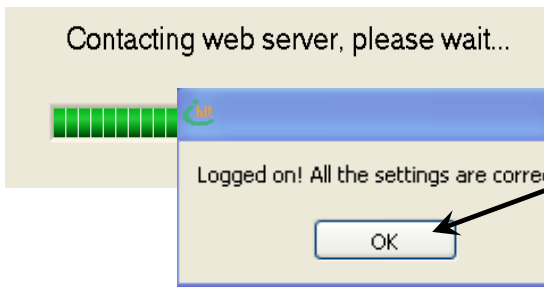

Bilder erscheinen
 Bitte bestätigen

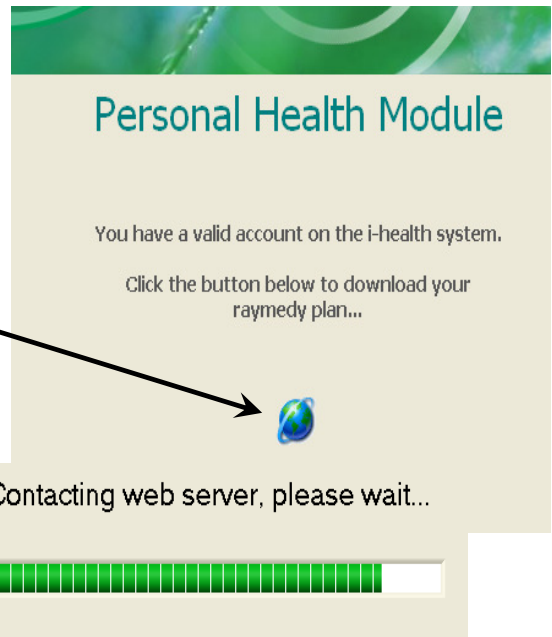

Bitte klicken Sie hier

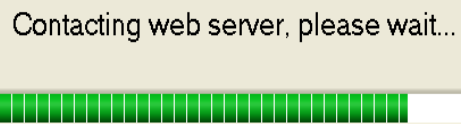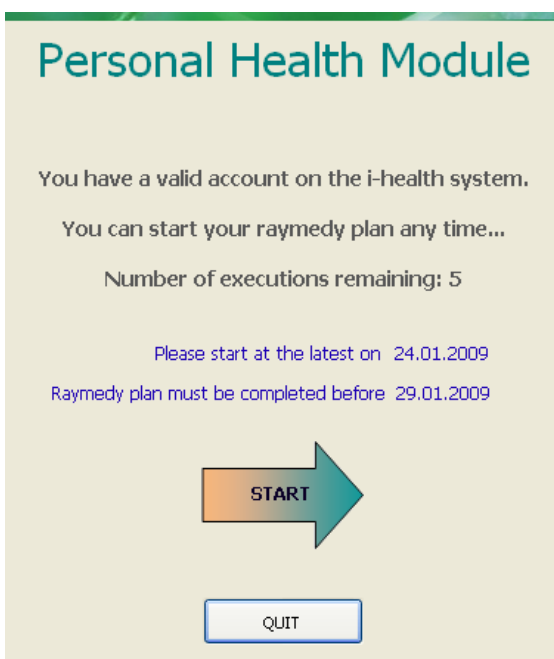

Dieses Bild erscheint
 Nun können Sie „offline“ sein.

Ab hier siehe Anwendung

Für Fragen steht Ihnen die Hotline zur Verfügung (0931) 32283-12 // (0177) 33 99 990

